

PRODUKTDATABLAD

neria™ guard infusionsæt

neria™ guard er et infusionsæt med en integreret indføringsadaptor med bløddelskanyle, til enkel og nem anlæggelse ved ét tryk på en knap.

En tilbagetrækningskanyle eliminerer risiko for stikskader og forbedrer patientkomforten i forbindelse med anlæggelse af den subkutane kanyle.

- Indføringsvinkel: 90 grader
- Indføringskanyle: G27
- Katetertykkelse: 0,68 mm i diameter (G23)

**Indholdsstoffer/materiale:**

PP, homopolymer, silikone, elastosil, PC, rustfrit stål, POM, polyester med polyacrylatklæber, M-ABS, Flexpeel, APET, PE, medicinsk papir, PUR, PTFE, UV lim

PVC/ftalater:

Nej/Nej

Latex:

Nej

CE klassifikation:

IIB

Steril:

Ja, EO steriliseret

Opbevaring:

Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato:

3 år

Holdbarhed i brug:

72 timer

Bortskaffelse af vare:

Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage

Forbrænding/Genanvendelse


Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Slangelængde	Fyldningsvolumme	Indhold	Ref. nr.
1963027	Neria Guard	Infusionsæt m sikkerhed, 27G x 6 mm, steril	12 cm	0,04 ml	æske a 10 stk	704012-5226
1963029	Neria Guard	Infusionsæt m sikkerhed, 27G x 6 mm, steril	30 cm	0,06 ml	æske a 10 stk	704030-5226
1963028	Neria Guard	Infusionsæt m sikkerhed, 27G x 6 mm, steril	60 cm	0,10 ml	æske a 10 stk	704060-5226
1963060	Neria Guard	Infusionsæt m sikkerhed, 27G x 9 mm, steril	60 cm	0,10 ml	æske a 10 stk	704060-5229
1963061	Neria Guard	Infusionsæt m sikkerhed, 27G x 9 mm, steril	110 cm	0,15 ml	æske a 10 stk	704110-5229


PRODUKTDATABLAD

neria™ guard infusionsæt

Neria guard anlæggelsesguide:

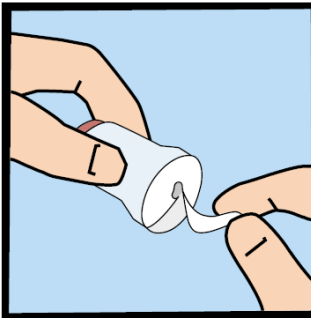


1. Fjern forsigtigt bagpapiret

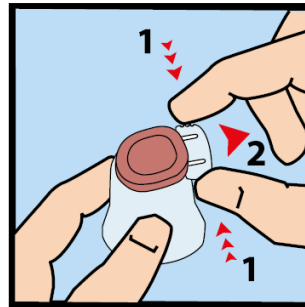


2. Fjern beskyttelsesdækslet fra indføringshuset. Dette gøres ved forsigtigt at klemme på siderne af beskyttelsesdækslet samtidig med, at beskyttelsesdækslet trækkes lige ud




3. Placer indføringshuset på huden og tryk den røde aktiveringsknop helt i bund for at indføre infusionskanylen

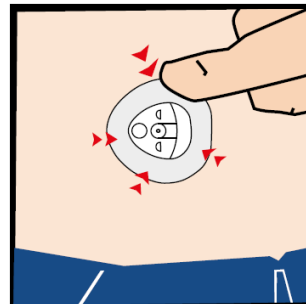

4. Følg klæbekanten med fingrene for at sikre, at plasteret hæfter godt

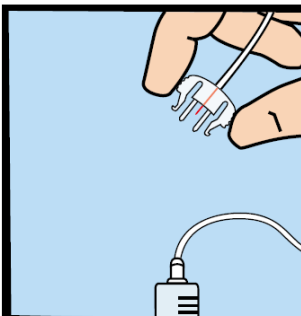

5. Forbind pumpe eller sprøjte for at fylde (prime) slangen. Følg producentens brugervejledning

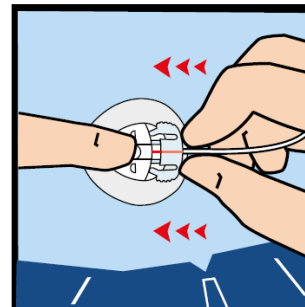

6. Placer en finger på kanylehuset og påsæt slangekonnektoren lige ind. Der høres et "klik", når den sidder korrekt.

Bemærk venligst at denne anlæggelsesguide kun illustrerer nogle af de trin, der indgår i anlæggelse af neria™ guard infusionsæt. Guiden er dermed ikke en erstatning for at gennemlæse brugervejledningen som er vedlagt produktet