

PRODUKTDATABLAD

PolyMem, PolyMem Max & PolyTube skumbandager uden klæb, steril

PolyMem er en multifunktionel sårbandage med en inflammationsmodulerende effekt, der aktivt fremmer sårheling.

Den anti-nociceptive effekt hæmmer smerteimpulsdannelsen og lindrer således sårsmertes.

Surfaktanten er et overfladeaktivt stof, der aktiveres af fugt og kontinuerligt frigives til sårbandagen. Den løsner og fjerner avitalt væv og renser sårbandagen atraumatisk, hvorved behovet for manuel soignering og debridering minimeres.

Glycerinen aktiveres ligeledes af fugt og medvirker til et fugtigt sårmiljø, ligesom den er plejende og beskyttende på den omkringliggende hud. Glycerinen sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen og har desuden en lugtreducerende effekt.

Den hydrofile polyuretan matrix har en kapillær effekt og skaber sammen med co-polymer superabsorbant et kontinuerligt træk op i bandagen. Herved trækkes væske fra det dybereliggende væv op til sårbandagen. Mikroødem i og under såret reduceres og blodgennemstrømning fremmes. Væske og urenheder absorberes, bindes i og fjernes sammen med bandagen. Når matrix bliver fugtig udvides bandagen, således skabes tæt kontakt til sårbandagen. På ydersiden er en semipermeabel film, der medvirker til et fugtigt sårmiljø.

Bør appliceres mindst 2–3 cm ud over sårkanten og skiftes inden sårsekret når bandagekanten.


Bør ikke kombineres med produkter under, da det vil hæmme PolyMem's effekt. Fikseres med passende fiksering. Ved fiksering med klæb, da kun i kanten.

Produkter uden klæb kan tilklippes. Ternet filmside skal vende væk fra såret. Kan sidde i op til 7 dage såfremt sårets tilstand tillader det.

PolyMem Standard kan anvendes til alle sår i alle faser med let til moderat sekretion.

**PolyMem MAX kan anvendes til alle sår i alle faser med moderat til kraftig sekretion.
Håndterer op til 3,5 gange mere eksudat end PolyMem Standard**

Polymem Tube er med slids og stjernehul. Passer til flere slangestørrelser omkring dræn, tuber, slanger og sonder.

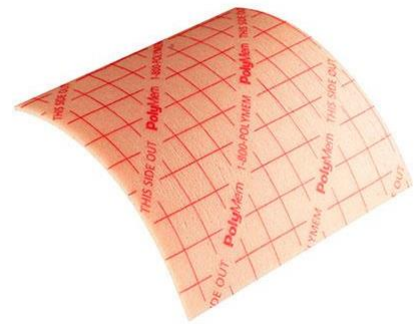

PRODUKTDATABLAD

PolyMem, PolyMem Max & PolyTube skumbandager uden klæb, steril

Indholdsstoffer:	Polyurethan matrix, polyurethanfilm, surfactant, glycerin, CO-polymer stivelse
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIb
Steril vare:	Ja
Holdbarhed:	5år
Opbevaring:	Stuetemperatur, tørt og udenfor direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATABLAD

PolyMem, PolyMem Max & PolyTube skumbandager uden klæb, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Strørrelse	Indhold	Ref. nr.
4241800	PolyTube	PolyMem med slids, steril	9 cm x 9 cm	æske a 15 stk - krt a 2 æsker	5335
4241802	PolyTube	PolyMem med slids, steril	7 cm x 7 cm	æske a 15 stk - krt a 2 æsker	5333
4279604	PolyMem	uden klæb, steril	4,7 cm x 4,7cm	æske a 20 stk - krt a 5 æsker	5022
4279605	PolyMem	uden klæb, steril	8 cm x 8 cm	æske a 15 stk - krt a 4 æsker	5033
4279610	PolyMem	uden klæb, steril	10 cm x 10 cm	æske a 15 stk - krt a 4 æsker	5044
4279615	PolyMem	uden klæb, steril	13 cm x 13 cm	æske a 15 stk - krt a 2 æsker	5055
4279620	PolyMem	uden klæb, steril	17 cm x 19 cm	æske a 15 stk - krt a 2 æsker	5077
4279625	PolyMem	uden klæb, steril	10 cm x 32 cm	æske a 12 stk - krt a 5 æsker	5124
4279630	PolyMem	rulle uden klæb, steril	10 cm x 61 cm	æske a 4 rl - krt a 2 æsker	5244
4279632	PolyMem	rulle uden klæb, steril	20 cm x 60 cm	æske a 2 rl	5824
4279650	PolyMem Max	uden klæb, steril	11 cm x 11 cm	æske a 10 stk - krt a 2 æsker	5045
4279651	PolyMem Max	uden klæber, steril	20 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 2 æsker	5088