

PRODUKTDATABLAD

DuoDERM hydrocolloid bandage, steril
DuoDERM Extra Thin, steril
DuoDERM standard, steril
DuoDerm Signal, steril
DuoDerm E, steril
DuoDERM, hydrogel, steril

DuoDERM-bandagerne er en serie sårbandager, som anvendes til okklusiv fugtbevarende sårbehandling. I kontakt med sår væske dannes en fugtig gel, som opretholder et fugtigt sår miljø og fremmer sårhelingen. DuoDERM-bandagerne har meget til fælles. De består af en hæftende, hydrokolloid masse, som bl.a. indeholder gelatine, pektin og natriumcarboxymethylcellulose.

Oversiden er belagt med polyuretanfilm/-skum. DuoDERM-bandagerne har en diskret farve, og kan også anvendes, når patienten tager bad. De fleste bandager kan klippes til i størrelse og form.

Skiftes efter behov - mindst én gang om ugen. Varm bandagen op mellem hænderne, inden den sættes på såret. Sæt derefter DuoDERM-bandagen på med en margin på 3 cm ud over sårets kanter.

Huden skal være tør, for at bandagen kan sidde fast. Bandagen kan sidde på såret i op til 7 dage, men skal skiftes, når den er mættet.

DuoDerm pasta er en blød og fleksibel pasta, som anvendes sammen med DuoDerm-bandagerne til bandagering af dybe sår.

DuoDERM hydrogel er en vandbaseret gel.



PRODUKTDATABLAD

DuoDERM hydrocolloid bandage, steril
DuoDERM Extra Thin, steril
DuoDERM standard, steril
DuoDerm Signal, steril
DuoDerm E, steril
DuoDERM, hydrogel, steril

Indholdsstoffer/materiale:	Pektin, gelatine, cellulose, polyurethanfilm, polyurethan skum, mineralsk olie (pastaen), polyisolbutylin, syntetiske elastomer
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse III
Steril vare:	Ja
Opbevaring uåbnet:	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3 år, 5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATABLAD

DuoDERM hydrocolloid bandage, steril
 DuoDERM Extra Thin, steril
 DuoDERM standard, steril
 DuoDerm Signal, steril
 DuoDerm E, steril
 DuoDERM, hydrogel, steril

Mediqs varesortiment

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
4278210	DuoDERM Standard	sårbandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	187610
4278215	DuoDERM Standard	sårbandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 20 stk - krt a 5 æsker	H7611
4278220	DuoDERM Standard	sårbandage, steril	20 cm x 20 cm	æske a 3 stk - krt a 10 æsker	H7620
4278370	DuoDERM Signal	hydrokolloid sårbandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 30 æsker	403326
4278372	DuoDERM Signal	hydrokolloid sårbandage, steril	14 cm x 14 cm	æske a 5 stk - krt a 5 æsker	403327
4278374	DuoDERM Signal	hydrokolloid sårbandage, steril	20 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 5 æsker	403328
4278376	DuoDERM Signal	hælbandage, steril	18,5 cm x 19,5 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	410500
4278378	DuoDERM Signal	sacralbandage, steril	20 cm x 22,5 cm	æske a 5 stk - krt a 5 æsker	410501
4278105	DuoDERM Mini	sårbandage, med hæftekant, steril	5 cm x 5 cm	æske a 50 stk - krt a 18 æsker	37300
4278150	DuoDERM Extra Thin	sårbandage, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 5 stk - krt a 30 æsker	187951
4278155	DuoDERM Extra Thin	sårbandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 30 æsker	187954
4278157	DuoDERM Extra Thin	sårbandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 20 stk - krt a 12 æsker	401807
4278160	DuoDERM Extra Thin	sårbandage, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 30 æsker	187956
4278165	DuoDERM Extra Thin	strips post-op, steril	5 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 45 æsker	187959
4278170	DuoDERM Extra Thin	strips post-op, steril	5 cm x 20 cm	æske a 10 stk - krt a 45 æsker	187961
4278175	DuoDERM Extra Thin	sårbandage, oval, steril	10 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 30 æsker	651008
4278310	DuoDERM E	sårbandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 20	187660

PRODUKTDATABLAD

DuoDERM hydrocolloid bandage, steril
DuoDERM Extra Thin, steril
DuoDERM standard, steril
DuoDerm Signal, steril
DuoDerm E, steril
DuoDERM, hydrogel, steril

				æsker	
4278312	DuoDERM E	sårbandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 20 stk - krt a 5 æsker	187658
4278317	DuoDERM E	sårbandage, steril	15 cm x 20 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	H7631
4278350	DuoDERM E	sårbandage, border, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 30 æsker	187970
4278355	DuoDERM E	sårbandage, border, steril	14 cm x 14 cm	æske a 5 stk - krt a 30 æsker	187971
4278507	DuoDERM	hydrogel med sprøjtespids, steril	15 g tube	æske a 10 tuber - krt a 23 æsk	401802