



5002-4404-0501/10 07-09-2009






BRUGSVEJLEDNING

Eureka  
strømpepåtager og  
-aftager til kompres-  
sionsstrømper med  
åben eller lukket tå






## EUREKA STRØMPEPÅTAGER

- Anbring strømpepåtageren som vist på billedet, og fold den sammen så hullerne passer ud for hinanden.
- Tag samlingspinden og hold i strømpepåtageren med den anden hånd.
- Samlingspinden føres gennem hullerne som vist. Begynd i den brede ende.
- Sørg for at spidsen på samlingspinden slutter i den lille lomme som vist.
- Træk strømpepåtageren på fodden med samlingspinden placeret under fodsålen og bagud.
- Sørg for at strømpepåtageren dækker tærne og sidder som vist på billedet.
- Pas på ikke at trække strømpepåtageren for langt op på fodden, da samlingspinden ellers kan løsne sig.
- Træk strømpen ud over strømpepåtageren på samme måde som en støvle. Træk samlingspinden ud, når hælen på strømpen sidder, hvor den skal og resten af strømpen er i ankelhøjde. Træk i samlingspinden (B). Træk herefter strømpepåtageren (A) ud af strømpen. Ved strømper uden tå, bør man holde igen på strømpen ved tåspidsen mens strømpepåtageren trækkes af. Herefter fordeles resten af strømpen på benet.

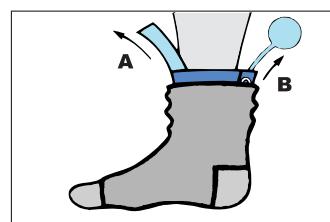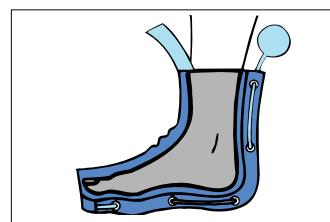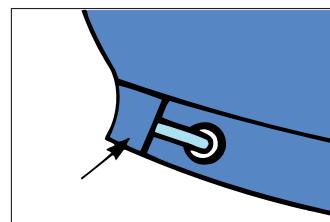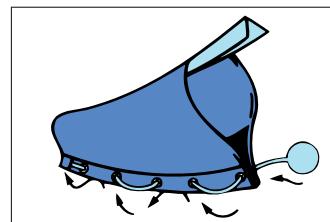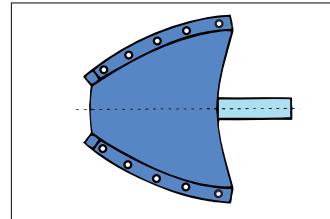

## EUREKA STRØMPEAFTAGER

- Træk strømpeaftageren så højt op som muligt uden på strømpen og sorg for, at den sidder godt til omkring vristen.
- Dette er vigtigt for at strømpeaftageren kan virke korrekt.
- Tag fat i strømpen fra oven og træk den ned uden på strømpeaftageren.
- Sørg for at strømpeaftageren hele tiden er under strømpen mens strømpen trækkes af.
- Træk strømpen af ned over hæl og vryst i én bevægelse.

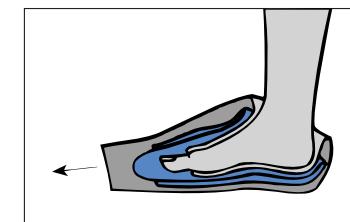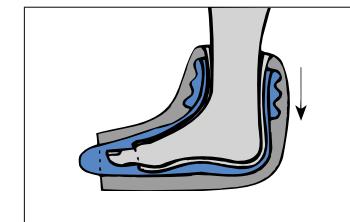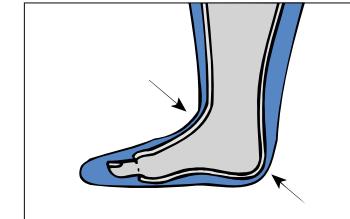

Eureka strømpepåtager kan anvendes til alle typer kompressionsstrømper, både med åben tå og lukket tå.

Eureka strømpeaftager kan anvendes til alle typer kompressionsstrømper

Eureka strømpepåtagere og -aftagere kan aftørres eller vaskes i lunkent vand.