



PRODUKTDATABLAD

CONTOUR®NEXT Kontrolvæsker



Kontrolvæskerne er beregnet til at afdække eventuelle tekniske problemer med blodsukkerapparater i CONTOUR®NEXT familien, CONTOUR®NEXT strimler eller måleteknik.

Kontrolflasken rystes grundigt ca. 15 gange før brug. Spidsen af beholderen aftørres med en ren fnugfri serviet, inden der trykkes en lille dråbe opløsning ud på en ren ikke-absorberende overflade - påfør ikke kontrolvæsken direkte på teststrimlen eller fingerspidsen. Kontrolvæsken analyseres som en almindelig blodprøve.

Det forventede resultat står på teststrimmelbeholderen. Bemærk at kontrolværdien kan variere fra et lotnummer til et andet lotnummer af teststrimler.

Kontrolvæsken kan anvendes med følgende blodsukkerapparater:

CONTOUR®NEXT, CONTOUR®NEXT ONE, CONTOUR®NEXT USB, CONTOUR®NEXT LINK, CONTOUR®NEXT LINK 2.4 samt CONTOUR®XT.

Vare nr.	Varebeskrivelse	Indhold
84030628	CONTOUR®NEXT kontrolvæske Lav	1 stk.
84030563	CONTOUR®NEXT kontrolvæske Normal	1 stk.
84030660	CONTOUR®NEXT kontrolvæske Høj	1 stk.

CE klassifikation:
Ja/IVDD List B, 2797

Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:
Ja

Kodes/kalibreres:
Nej

Inden måling:
Flasken rystes grundigt ca. 15 gange og spidsen aftørres med ren fnugfri serviet

Prøvemængde:
0,6 µL

Kontrolvæsken suges fra:
Spidsen af teststrimmel

Måletid:
5 sekunder

Acceptområde:
Det forventede resultat står på teststrimmelbeholderen

Pakningsindhold:
1 flaske á 2,5 ml

Holdbarhed:
I uåbnet tilstand til udløbsdato

Holdbarhed efter åbning:
6 måneder efter åbning. Det kan være en hjælp at skrive dato for første åbning på flasken.

Opbevaringstemperatur:
Opbevares ved stuetemperatur

Dansk mærkning på emballagen:
Ja

Dansk brugsanvisning:
Ja

Garanti:
Nej

PVC/ftalater:
Nej

Latex:
Nej

Steril vare/metode:
Nej

Bortskaffelse:
Se indlægsseddel